












Checkliste zur Vorbereitung der Validierung eines DAC

Bitte senden Sie die ausgefüllte Checkliste zur Vorbereitung der Validierung schnellstmöglich an uns zurück.

<p>Praxisadresse:</p> <p>Projekt-Nummer:</p>	<p>Verantwortlich für die Aufbereitung:</p> <p>Durchwahl:</p> <p>Erstvalidierung</p> <p>Revalidierung</p> <p>letzte Validierung am:</p>			
<p>Angaben zum Gerät:</p> <p>Hersteller:</p> <p>Typ:</p> <p>Serien-Nr:</p> <p>Baujahr:</p> <p>Erstinbetriebnahme:</p> <p>nächste Wartung:</p> <p>(Die Wartungsintervalle des Herstellers müssen eingehalten werden)</p>	<p>Verwendete Beladung: Instrumente / Zusatzdeckel</p> <p>Deckel „Standard“ oder Deckel „blue“ mit Adapter für Übertragungsinstrumente Anzahl:</p> <p>Deckel „Flex“ oder Deckel „green“ für ZEG-Spitzen, Düsen u.ä. Anzahl:</p> <p>Deckel „Korb“ für massive Instrumente Anzahl:</p>			
<p>Verwendete Adapter für Turbinen, Winkelstücke oder Handstücke:</p> <table data-bbox="220 1243 790 1355"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>Anzahl: Anzahl: Anzahl:</p> <p>sonstige: Anzahl:</p>				<p>Folgende Dokumente müssen vorliegen:</p> <ul style="list-style-type: none">- QR-22-Protokoll (Aufstellungsprotokoll)- Schulungsnachweise der Verantwortlichen bei dem Validierungstermin- Bedienungsanleitung- Klassifizierung der Medizinprodukte nach RKI-Richtlinie (unkritisch, semikritisch, kritisch)- Arbeitsanweisungen
				
<p>Bitte bedenken Sie,</p> <ul style="list-style-type: none">- dass die Validierung den Praxisablauf stören kann.- dass Ihnen die Instrumente, die wir für die Messungen benötigen, nicht sofort wieder zur Verfügung stehen.- dass unserem Mitarbeiter/unsere Mitarbeiterin der/die Verantwortliche für die Aufbereitung für Fragen zeitweise zur Verfügung steht.- dass ein freier Arbeitsbereich in reiner Umgebung für das Messequipment (z.B. Notebook) zur Verfügung gestellt werden muss (evtl. im Nebenraum).	<p>Wichtige Hinweise zur Validierung eines DAC</p> <p>Der genaue Ablauf wird in einem Vorgespräch besprochen und die Ergebnisse in einem Abschlussgespräch vorgestellt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Es werden pro Deckel je 3 real verschmutzte Instrumente benötigt.- Zusätzlich werden bei einer Erstvalidierung 3 Übertragungsinstrumente (Standard-Deckel bzw. Deckel „blue“) und 3 Instrumente (Flex-Deckel bzw. Deckel „green“) benötigt.			